



CATALOGO DISPOSITIVI MIOFUNZIONALI





Primalux Ortodonzia S.r.l.

Corso Francia 430 - 10146 - Torino (TO)

Tel. 011 773 2551 - ordini@primalux.it - www.primalux.it



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

CORRECTING BREATHING
HABITS SINCE 1989

Distributore esclusivo per l'Italia



INDICE CATALOGO DISPOSITIVI MIOFUNZIONALI

| | |
|---|-----------|
| DISPOSITIVI MIOFUNZIONALI MRC - MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO. | 4 |
| GUIDA PRATICA PER LA SCELTA DEI DISPOSITIVI | 6 |
| Perchè scegliere Myobrace® | 8 |
| Come utilizzare i dispositivi Myobrace® | 8 |
| Riepilogo dei dispositivi Myobrace® | 9 |
| • Myobrace® MYOCHEW | 10 |
| • Myobrace® for JUNIORS | 10 |
| • Myobrace® K-ZERO for KIDS | 10 |
| • Myobrace® for KIDS | 11 |
| • Myobrace® for KIDS – BROAD | 11 |
| • Myobrace® for TEENS | 12 |
| • Myobrace® for ADULTS | 12 |
| • Myobrace® for INTERCEPTIVE CLASS III - Dentizione mista | 13 |
| • Myobrace® for PERMANENT DENTITION CLASS III - Dentizione permanente | 13 |
| • Myobrace® for BRACES | 14 |
| • Poster con sfondo foto | 14 |
| • Istruzioni per l'utilizzo del Misuratore | 15 |
| • SET Misurazione Myobrace® | 15 |
| • I risultati con Myobrace® | 16 |
| Perchè scegliere Myosa® | 17 |
| Come scegliere e utilizzare i dispositivi Myosa® | 17 |
| Riepilogo dei dispositivi Myosa® | 17 |
| • MyOSA® for KIDS | 18 |
| • MyOSA® S1H HYBRID for ADULTS | 19 |
| • MyOSA® for ADULTS | 19 |
| • MyOSA® for TEETH GRINDERS - Per BRUXISTI | 21 |
| • MyOSA® for TMJ - TMD - Per ATM | 21 |
| Perchè scegliere Myotalea® | 22 |
| Riepilogo dei dispositivi Myotalea® | 22 |
| • MyoTALEA® - TLJ - TLJB - TLP - Lip Trainer | 23 |
| CONTATTI PRIMALUX | 24 |



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

**CORRECTING BREATHING
HABITS SINCE 1989**

myobrace®

myosa


myoTalea®



IL SISTEMA DI TRATTAMENTO MRC

Dal 1989, MRC, con studi e ricerca in continuo progresso, fornisce a professionisti di molteplici discipline, dispositivi tecnologicamente innovativi e programmi educativi per il trattamento di disturbi respiratori, miofunzionali, malocclusioni e ATM. I dispositivi sono utilizzati in più di 100 paesi al mondo.

myobrace®

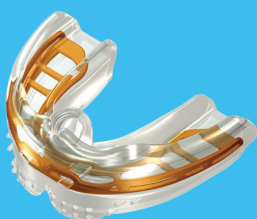


Myobrace è la gamma di **dispositivi miofunzionali passivi** più avanzata al mondo; consente di trattare i disturbi di respirazione, deglutizione ed errata posizione della lingua, apportando miglioramenti nelle malocclusioni.

myoTalea®




Myotalea è una gamma innovativa di **dispositivi miofunzionali attivi** che migliora la forza e il tono delle vie aeree e dei muscoli orofacciali, dando la possibilità di fornire un allenamento mirato come mai prima d'ora.

Disfunzione delle vie aeree
Sviluppo craniofacciale
Disturbi del sonno
Disturbi miofunzionali
Allineamento dentale
ATM

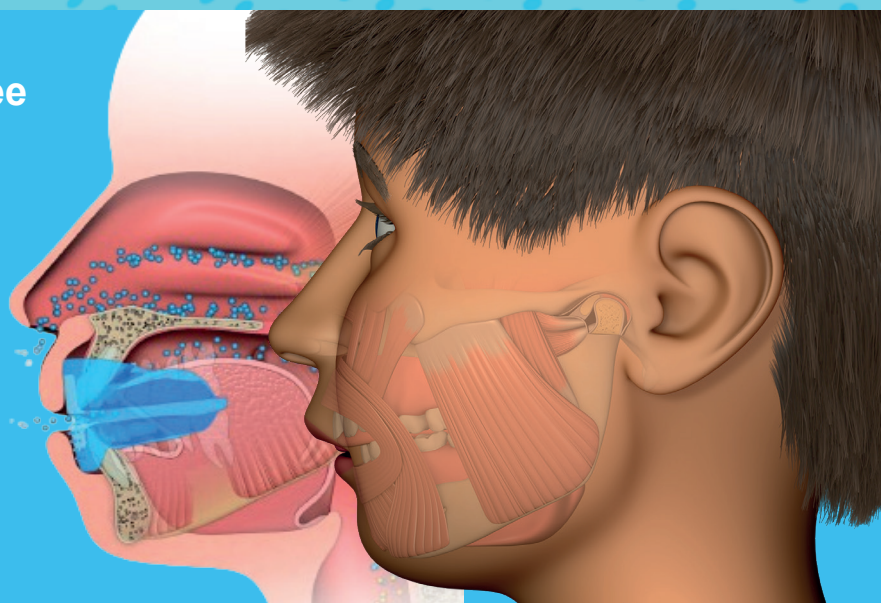

La prima azienda al mondo ad aver introdotto dispositivi preformati mirati alla correzione delle abitudini miofunzionali errate ed ai disturbi respiratori.

myosa[®]

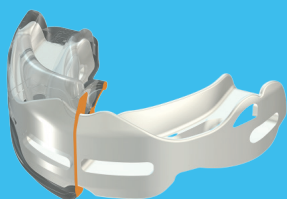

La gamma **Myosa** integra il trattamento dei disturbi respiratori, miofunzionali e dell'ATM, con un sistema semplice ed efficace di **dispositivi passivi**.



Il sistema **TMJ** è composto da una gamma di **dispositivi passivi** progettata per una varietà di condizioni relative al trattamento del bruxismo e dei disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare (ATM), compresi i disturbi intra ed extracapsulari.



GUIDA PRATICA PER LA SCELTA DEI DISPOSITIVI

TIPOLOGIA DISPOSITIVI

myobrace®

PASSIVA
(Utilizzo notturno)

myosa®

■ PERCHÉ SCEGLIERE MYOBRACE (PASSIVO)

In presenza di abitudini miofunzionali viziate:

- errata posizione della lingua a riposo
- respirazione orale
- deglutizione atipica
- suzione del pollice

■ COME SCEGLIERE IL TIPO DI MYOBRACE

- sviluppo dentizione primaria: MYOCHEW
- dentizione decidua: serie J (J1-J2-J3)
- dentizione mista: serie K (K1-K2-K3)
- dentizione permanente (10÷15 anni): serie T (T1-T2-T4)
- dentizione permanente (15 anni+): serie A (A1-A2-A3)
- Classe III dentizione mista - o set 1.5 mm: serie I-3 (I3N- I3-I3H)
- Classe III dentizione mista/permanente - o set 3 mm: serie P-3 (P3N-P3-P3H)

■ PERCHÉ SCEGLIERE MYOSA (PASSIVO)

In presenza di disturbi respiratori del sonno:

- iperventilazione orale
- russamento

■ COME SCEGLIERE IL TIPO DI MYOSA

- **Da 3 a 15 anni**
con BASSO BFT e BHT ≤ 25 sec.: **KS1**
con BUON BFT e BHT > 25 sec.: **KS2**
 - **Oltre 15 anni**
con BHT ≤ 20 sec.: **S1H**
con BHT > 20 ≤ 30 sec.: **S1**
con BHT > 30 sec.: **S2**
Stabilizzazione con BHT ≥ 45 sec.: **S3**
- BFT** = Valutazione respiratoria
BHT = Tempo sospensione respiratoria (vedi pag. 18)

■ COME UTILIZZARE I DISPOSITIVI MYOBRACE

Per ogni serie ci sono 3 FASI:

FASE 1

Dispositivo morbido in silicone medicale autoclavabile.
Il paziente impara **posizione corretta della lingua** e **respirazione nasale**.
Per pazienti in dentizione mista respiratori orali utilizzare K0 al posto del K1.

FASE 2

Dispositivo in silicone medicale con all'interno Dynamicore.
Continua la **correzione** delle **abitudini viziate** e favorisce lo **sviluppo dell'arcata**.
Se necessita un maggiore ampliamento, utilizzare filo BWS con dispositivo congiunto (T1-bws)

FASE 3

Dispositivo rigido.
Continua la **correzione** delle abitudini viziate nella **fase ritentiva**.

OPZIONALE - FASE INTERMEDIA SOLO PER SERIE T DOPO LA FASE 2:

Dispositivo in silicone medicale con all'interno Dynamicore e alloggiamento per i denti.

Continua la correzione delle abitudini viziate e favorisce l'allineamento dentale **T3** (unico dispositivo in 7 misure)

GUIDA PRATICA PER LA SCELTA DEI DISPOSITIVI

TIPOLOGIA DISPOSITIVI

myoTalea®
ATTIVA

(Utilizzo diurno per eseguire gli esercizi)



■ PERCHÉ SCEGLIERE MYOTALEA (ATTIVO)

- Per esercitare lingua, labbra e muscolatura: TLJ
- Per esercitare lingua, labbra e muscolatura su pazienti con i brackets: TLJB
- Per esercitare muscolatura labiale: LIP TRAINER e TLP


■ QUALE TIPO DI MYOBRACE CON ALLINEATORI: (PASSIVO) • Tutti i dispositivi di Fase 1



Serie K (K1)



Serie T (T1)

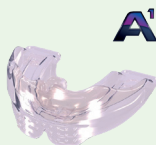

Serie A (A1)




Serie I-3 (I3N)



Serie P-3 (P3N)


■ QUALE TIPO DI MYOBRACE CON BRACKETS: (PASSIVO) • Serie B (B1 – B2 – B3)

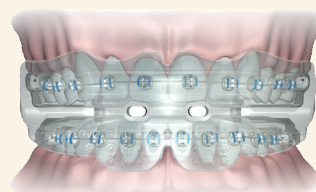

■ COME SCEGLIERE LA MISURA:

Con misuratore di carta: (vedi pag. 15)

Misura distale da laterale a laterale superiore. Riesce a dare una misura in linea di massima, ma non dà l'effettiva misura dell'arcata.

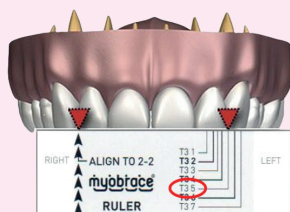

Con set di misurazione: (vedi pag. 15)

Nel set sono presenti dispositivi di Fase 1 (autoclavabili) per le diverse serie e nelle diverse misure. Azzerare la possibilità di errore; se in dubbio, scegliere la misura più grande.



Set misurazione
Include 8 dispositivi

PASSIVA
(Utilizzo notturno)

myobrace®

■ PERCHÉ SCEGLIERE MYOBACE

In presenza di abitudini miofunzionali viziate:

- errata posizione della lingua a riposo
- respirazione orale
- deglutizione atipica
- suzione del pollice

■ COME UTILIZZARE I DISPOSITIVI MYOBACE

**1 o 2 ORE AL GIORNO
E DI NOTTE DURANTE IL SONNO**
**DURATA TRATTAMENTO PER OGNI FASE
4 ÷ 6 MESI**

PER OGNI SERIE CI SONO 3 FASI:

FASE 1

CORREZIONE ABITUDINI VIZIATE E RIPRISTINO RESPIRAZIONE NASALE



Tutti i dispositivi di **FASE 1** mirano a favorire la **respirazione nasale** e la **correzione** delle **abitudini** miofunzionali **viziate**.

Dispositivo morbido e flessibile, in silicone medicale autoclavabile, si adatta a qualsiasi forma d'arcata e malocclusione.

Il paziente impara **posizione corretta della lingua** e **respirazione nasale**.

Per pazienti in dentizione mista respiratori orali utilizzare K0 al posto del K1.

FASE 2

SVILUPPO DELL'ARCATA E DEGLUTIZIONE



Tutti i dispositivi di **FASE 2** mirano a favorire lo **sviluppo dell'arcata** e proseguire con la **correzione** delle **abitudini** miofunzionali **viziate**.

Dispositivo in silicone medicale con all'interno Dynamicore che favorisce lo sviluppo della forma dell'arcata superiore ed inferiore creando più spazio per posizionare la lingua a riposo e deglutire correttamente.

Se necessita un maggiore ampliamento, utilizzare filo BWS con dispositivo congiunto (T1-bws)

FASE 3

ALLINEAMENTO E RITENZIONE



Tutti i dispositivi di **FASE 3** mirano ad ultimare la **correzione** delle **abitudini** miofunzionali **viziate**, l'allineamento dentale e l'azione ritenitiva, grazie alla **struttura** più **rigida**.

La lamella linguale cava, spinge la lingua a posizionarsi nel punto giusto.

Per i pazienti in dentizione decidua - Serie **JUNIORS (J)** - l'obiettivo della FASE 3 è la stabilizzazione dell'occlusione oltre la ritenzione.

OPZIONALE - FASE INTERMEDIA SOLO PER SERIE T DOPO LA FASE 2:

Dispositivo in silicone medicale con all'interno Dynamicore e alloggiamento per i denti.

Continua la correzione delle abitudini viziate e favorisce l'allineamento dentale **T3** (unico dispositivo in 7 misure).

□ COME SCEGLIERE IL TIPO DI MYOBRACE

- sviluppo dentizione primaria: MYOCHEW
- dentizione decidua: serie J (J1 Fase 1 - J2 Fase 2 - J3 Fase 3)
- dentizione mista: serie K (K1 Fase 1 - K2 Fase 2 - K3 Fase 3)
- dentizione permanente: serie T (T1 Fase 1 - T2 Fase 2 - T3 Fase intermedia - T4 Fase 3)
- dentizione permanente (15 anni+): serie A (A1 Fase 1 - A2 Fase 2 - A3 Fase 3)
- Classe III dentizione mista - o set 1.5 mm: serie I-3 (I3N Fase 1 - I3 Fase 2 - I3H Fase 3)
- Classe III dentizione mista/permanente - o set 3 mm: serie P-3 (P3N Fase 1 - P3 Fase 2 - P3H Fase 3)



Myobrace Myochew

Sviluppo della
Dentizione Primaria



Myobrace for Juniors

Dentizione decidua

Età: 3 ÷ 6 anni



Myobrace for Kids

Dentizione mista

Età: 6 ÷ 10 anni



Myobrace for Kids-Broad *per gruppi etnici specifici*

Dentizione mista


Età: 6 ÷ 12 anni



Myobrace for Teens

Sviluppo della
Dentizione Permanente

Età: 10 ÷ 15 anni

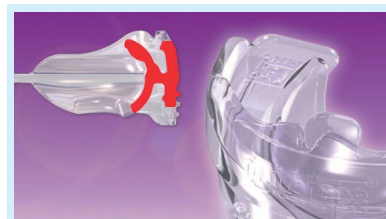

Myobrace for Adults

Dentizione Permanente

Età: 15 anni +



Myobrace for Interceptive Classe III

Dentizione mista

Età: 5 ÷ 12 anni



Myobrace for Permanent Classe III

Dentizione permanente

Età: 12 anni +



Myobrace for Braces

Dentizione permanente

Con apparecchio ortodontico



MYOBRACE® MYOCHEW Sviluppo della Dentizione primaria


Myochew™ è stato appositamente progettato per bambini piccoli per incoraggiare la respirazione nasale e migliorare la funzione della lingua e dei muscoli masticatori. Il delicato massaggio delle setole sporgenti, allevia il fastidio dei denti che erompono e aiuta l'igiene orale.



- 1 **Setole sporgenti** - Per alleviare il fastidio dei denti che erompono e per l'igiene orale
- 2 **Tubo linguale** - Per rinforzare la lingua
- 3 **Base con molle ad aria** - Per stimolare lo sviluppo mascellare
- 4 **Doppia arcata** - Stimola la respirazione nasale
- 5 **Aletta di dentizione** - Può essere masticata mentre erompono i denti
- 6 **Cinturino staccabile** - Per sicurezza e per prevenire la caduta a terra

MYOBRACE® FOR JUNIORS Dentizione decidua (3÷6 anni)

Myobrace® for Juniors è un sistema di trattamento utilizzato in dentizione decidua che favorisce una buona occlusione e un corretto sviluppo cranio-facciale attraverso la correzione precoce della respirazione orale e delle cattive abitudini miofunzionali.

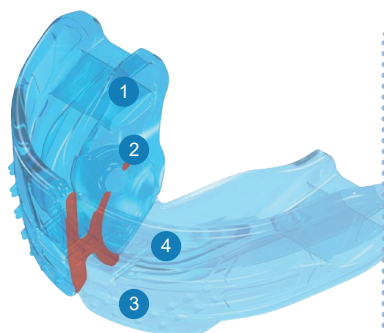


- 1 **Sospensione ad aria** consente la stimolazione delicata ed attiva dei muscoli mascellari e facciali in crescita
- 2 **Lamella linguale, paralingua e spessori (rialzo)** allenano la lingua a posizionarsi correttamente e a prevenire la suzione del pollice
- 3 **Scudo labiale esteso** dissuade l'eccessiva attività dei muscoli labiali
- 4 **Due grandi fori** consentono di respirare dalla bocca

| Cod. | Descrizione |
|----------|----------------------------|
| PT410011 | J1 Myobrace JUNIORS M blu |
| PT410016 | J1 Myobrace JUNIORS M rosa |
| PT410010 | J1 Myobrace JUNIORS L blu |
| PT410015 | J1 Myobrace JUNIORS L rosa |
| PT410021 | J2 Myobrace JUNIORS M blu |
| PT410026 | J2 Myobrace JUNIORS M rosa |
| PT410020 | J2 Myobrace JUNIORS L blu |
| PT410025 | J2 Myobrace JUNIORS L rosa |
| PT410031 | J3 Myobrace JUNIORS M blu |
| PT410036 | J3 Myobrace JUNIORS M rosa |
| PT410030 | J3 Myobrace JUNIORS L blu |
| PT410035 | J3 Myobrace JUNIORS L rosa |

MYOBRACE® K-ZERO FOR KIDS Per Respiratori orali Dentizione mista (6÷10 anni)

Il Myobrace® K0 è il dispositivo di partenza per i respiratori orali importanti. La priorità è garantire una corretta funzionalità delle vie aeree attraverso il foro più ampio del K1 ed il rafforzamento iniziale della lingua attraverso esercizi attivi. Passare al K1 solo quando si porta il K0 tutta la notte ed i test di funzionalità respiratoria (BHT) sono migliorati, insieme a qualsiasi sintomo del sonno, come il russamento.

| Cod. | Descrizione |
|----------|--|
| PT411000 | K0 Myobrace KIDS M blu Respiratori orali |

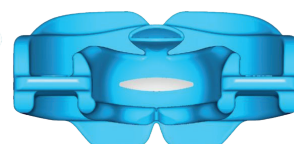




MYOBACE® FOR KIDS

Dentizione mista (6÷10 anni)

Myobrace® for Kids è la serie più utilizzata. Ottimizza lo sviluppo cranio-facciale ed allinea i denti anteriori in eruzione attraverso la correzione della respirazione orale e delle abitudini miofunzionali, mentre la presenza del Dynamicore™ favorisce lo sviluppo dell'arcata superiore ed inferiore.

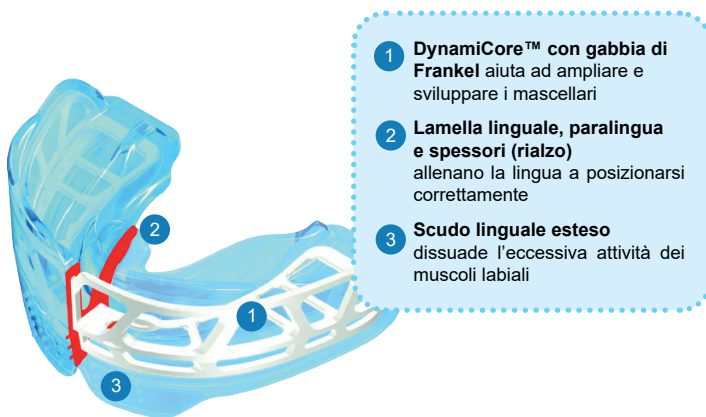

| Cod. | Descrizione |
|----------|-------------------------|
| PT411145 | K1 Myobrace KIDS S blu |
| PT411146 | K1 Myobrace KIDS S rosa |
| PT411150 | K1 Myobrace KIDS M blu |
| PT411151 | K1 Myobrace KIDS M rosa |
| PT411155 | K1 Myobrace KIDS L blu |
| PT411156 | K1 Myobrace KIDS L rosa |
| PT411215 | K2 Myobrace KIDS S blu |
| PT411216 | K2 Myobrace KIDS S rosa |
| PT411220 | K2 Myobrace KIDS M blu |
| PT411221 | K2 Myobrace KIDS M rosa |
| PT411225 | K2 Myobrace KIDS L blu |
| PT411226 | K2 Myobrace KIDS L rosa |
| PT411370 | K3 Myobrace KIDS S blu |
| PT411380 | K3 Myobrace KIDS M blu |
| PT411381 | K3 Myobrace KIDS M rosa |
| PT411390 | K3 Myobrace KIDS L blu |

MYOBACE® FOR KIDS BROAD - ARCATA AMPIA


Dentizione mista (6÷12 anni)

Per gruppi genetici ed etnici specifici

(Asia, America centrale e America latina)

Myobrace® for Kids - Broad è un sistema a tre fasi progettato per alcuni gruppi genetici ed etnici specifici con una forma di arcata anteriore più piatta, un'area più ampia per i canini e dei segmenti posteriori divergenti. La definizione della forma corretta dell'arcata in questi pazienti è fondamentale per ottimizzare l'allineamento dentale, lo sviluppo facciale e la stabilità post-trattamento.

| Cod. | Descrizione |
|----------|----------------------------------|
| PT411170 | K1B Myobrace KIDS BROAD M trasp. |
| PT411180 | K2B Myobrace KIDS BROAD M trasp. |
| PT411190 | K3B Myobrace KIDS BROAD M trasp. |

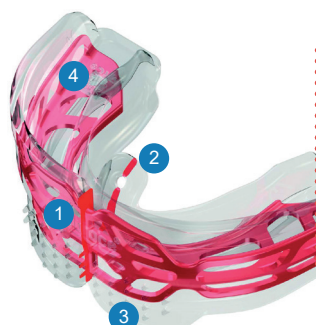

- 1 **DynamiCore™ brevettato** specifico per sviluppare le forme di arcata ampie
- 2 **Lamella linguale, paralingua e spessori (rialzo)** allenano la lingua a posizionarsi correttamente
- 3 **Scudo labiale esteso** dissuade l'eccessiva attività dei muscoli labiali
- 4 **Design Broad brevettato** specifico per le forme di arcata più ampie





MYOBRACE® FOR TEENS

Sviluppo della Dentizione permanente (10÷15 anni)

Myobrace® for Teens è un trattamento miofunzionale progettato per sostituire la necessità di una terapia ortodontica complessa con apparecchio fisso ed estrazioni. L'obiettivo principale è quello di correggere la respirazione orale e le abitudini miofunzionali viziate che causano la malocclusione. Con una buona collaborazione, l'apparecchio fisso non è, di norma, necessario.



Dispositivo OPZIONALE T1 BWS (FASE 1)

Da utilizzare associato al sistema a filo piegato di Farrel™ (BWS) per ottenere più rapidamente lo sviluppo dell'arcata. Una volta creato spazio sufficiente nell'arcata superiore, si toglie il BWS e il trattamento prosegue con Myobrace® T2.

Dispositivo OPZIONALE T3 (FASE 3)

T3 - Fase di allineamento dentale, dopo la FASE 2

| Cod. | Descrizione |
|----------|---|
| PT412001 | T1 Myobrace TEENS M blu |
| PT412006 | T1 Myobrace TEENS L blu |
| PT412018 | T1 ^{BWS} Myobrace TEENS M trasp. |
| PT412021 | T2 Myobrace TEENS M trasp. |
| PT412022 | T2 Myobrace TEENS L trasp. |
| PT412040 | T4 Myobrace TEENS M blu |
| PT412041 | T4 Myobrace TEENS L blu |

| Cod. | Descrizione |
|----------|------------------------------------|
| PT412031 | T3 Myobrace TEENS mis. 1 (30.0 mm) |
| PT412032 | T3 Myobrace TEENS mis. 2 (31.5 mm) |
| PT412033 | T3 Myobrace TEENS mis. 3 (32.5 mm) |
| PT412034 | T3 Myobrace TEENS mis. 4 (33.5 mm) |
| PT412035 | T3 Myobrace TEENS mis. 5 (35.0 mm) |
| PT412036 | T3 Myobrace TEENS mis. 6 (36.5 mm) |
| PT412037 | T3 Myobrace TEENS mis. 7 (37.5 mm) |

MYOBRACE® FOR ADULTS

Dentizione permanente (15 anni+)

Myobrace® for Adults è un sistema di dispositivi a tre fasi per la dentizione permanente, dove la malocclusione e le abitudini scorrette si sono consolidate da molti anni, motivo per cui i risultati in questa fascia d'età sono meno prevedibili. Il principale obiettivo è l'allineamento dentale con il miglioramento delle abitudini viziate.



| Cod. | Descrizione |
|----------|----------------------------|
| PT414070 | A1 Myobrace ADULTS M viola |
| PT414071 | A1 Myobrace ADULTS L viola |
| PT414080 | A2 Myobrace ADULTS M viola |
| PT414081 | A2 Myobrace ADULTS L viola |
| PT414090 | A3 Myobrace ADULTS M viola |
| PT414091 | A3 Myobrace ADULTS L viola |

Dispositivo A1 (FASE 1)


Utilizzabile con "The Farrel Bent Wire System™" (BWS) e MYOLAY™



■ MYOBRACE® FOR INTERCEPTIVE CLASS III - OFFSET 1.5 mm

Dentizione mista in Classe III (5÷12 anni)

Myobrace® Interceptive Classe III è progettato per il trattamento precoce della Classe III in dentizione mista: è un periodo cruciale che consente di correggere le abitudini viziate per favorire lo sviluppo mesio-facciale e ristabilire il rapporto dento/scheletrico. Il sistema di trattamento a tre fasi può essere utilizzato dai 5 ai 12 anni di età, ma i risultati ottimali si ottengono tra i 5 e gli 8 anni.

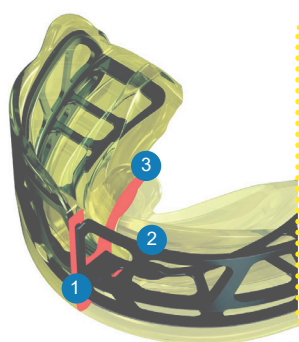

- 1 **DynamicoCore™ con gabbia di Frankel** aiuta ad ampliare e sviluppare i mascellari, creando più spazio per la lingua
- 2 **Piccoli fori di aerazione e forma a doppio arco** prevengono la respirazione orale che è comune in gran parte delle Classi III
- 3 **Lamella linguale, paralingua e spessori (rialzo)** allenano la lingua a posizionarsi correttamente. Ciò può prevenire la crescita indesiderata della mandibola


| Cod. | Descrizione |
|----------|----------------------------------|
| PT413055 | i-3N Myobrace CLASS III S giallo |
| PT413060 | i-3N Myobrace CLASS III M giallo |
| PT413065 | i-3N Myobrace CLASS III L giallo |
| PT413005 | i-3 Myobrace CLASS III S giallo |
| PT413000 | i-3 Myobrace CLASS III M giallo |
| PT413010 | i-3 Myobrace CLASS III L giallo |
| PT413080 | i-3H Myobrace CLASS III M giallo |

Dispositivo i-3^N (FASE 1)
Utilizzabile con "The Farrel Bent Wire System™" (BWS) e MYOLAY™

■ MYOBRACE® FOR PERMANENT DENTITION CLASS III - OFFSET 3 mm

Dentizione permanente in Classe III (12 anni+)

Myobrace® Permanent Dentition Class III rappresenta un'opzione di trattamento non invasivo per i pazienti in dentizione permanente che hanno perso l'opportunità del trattamento Interceptive Class III. Poiché la crescita in questi pazienti è terminata, la correzione della discrepanza mascellare è difficile, motivo per cui questa gamma si concentra in particolare sulla Classe dentale III oltre al miglioramento delle abitudini miofunzionali.

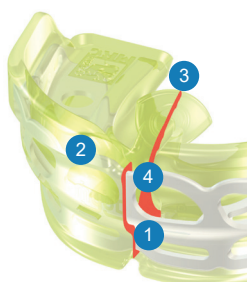

- 1 **DynamicoCore™ con gabbia di Frankel** aiuta ad ampliare e sviluppare i mascellari, creando più spazio per la lingua
- 2 **Piccoli fori di aerazione e forma a doppio arco** prevengono la respirazione orale che è comune in gran parte delle Classi III
- 3 **Lamella linguale, paralingua e spessori (rialzo)** allenano la lingua a posizionarsi correttamente
- 4 **L'Offset di 3 mm** corregge il morso inferiore spingendo i denti superiori in avanti e quelli inferiori indietro

| Cod. | Descrizione |
|----------|----------------------------------|
| PT413091 | P-3N Myobrace CLASS III M trasp. |
| PT413092 | P-3N Myobrace CLASS III M verde |
| PT413095 | P-3 Myobrace CLASS III M trasp. |
| PT413097 | P-3 Myobrace CLASS III M verde |
| PT413110 | P-3H Myobrace CLASS III M verde |
| PT413111 | P-3H Myobrace CLASS III M trasp. |
| PT413115 | P-3H Myobrace CLASS III L verde |
| PT413116 | P-3H Myobrace CLASS III L trasp. |


Dispositivo P-3^N (FASE 1)
Utilizzabile con "The Farrel Bent Wire System™" (BWS) e MYOLAY™



MYOBRACE® FOR BRACES

Dentizione permanente


Myobrace for Braces™ è un sistema di dispositivi a tre fasi studiato specificamente per essere compatibile con gli apparecchi ortodontici, per controllare le disfunzioni muscolari che si verificano nella maggior parte delle malocclusioni mentre i denti vengono raddrizzati, offrendo numerosi vantaggi per il trattamento ortodontico.

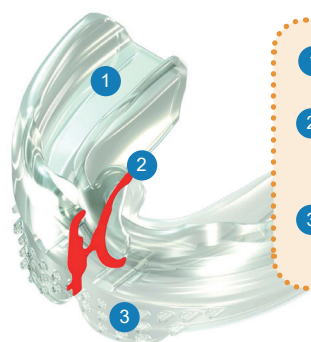



- 1 Spazio maggiore per consentire l'alloggiamento degli attacchi
- 2 Lamella linguale, paralingua e spessori allenano la lingua a poggiare correttamente sulla mascella superiore
- 3 Lip bumper ampliato e scudi laterali dissuadono l'iperattività labiale

DA UTILIZZARE CON L'APPARECCHIO ORTODONTICO

| Cod. | Descrizione |
|----------|--|
| PT415000 | B1 Myobrace BRACES M trasp. |
| PT415005 | B1 Myobrace BRACES L trasp. |
| PT415020 | B1 LING Myobrace BRACES M trasp. Con apparecchio fisso linguale |
| PT415030 | B2 Myobrace BRACES M trasp. |
| PT415035 | B2 Myobrace BRACES L trasp. |
| PT415040 | B3 Myobrace BRACES M trasp. |

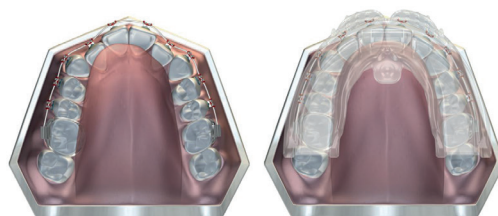

UTILIZZA IL POSTER DI SFONDO FOTO PER VEDERE I PROGRESSI DEI TUOI PAZIENTI

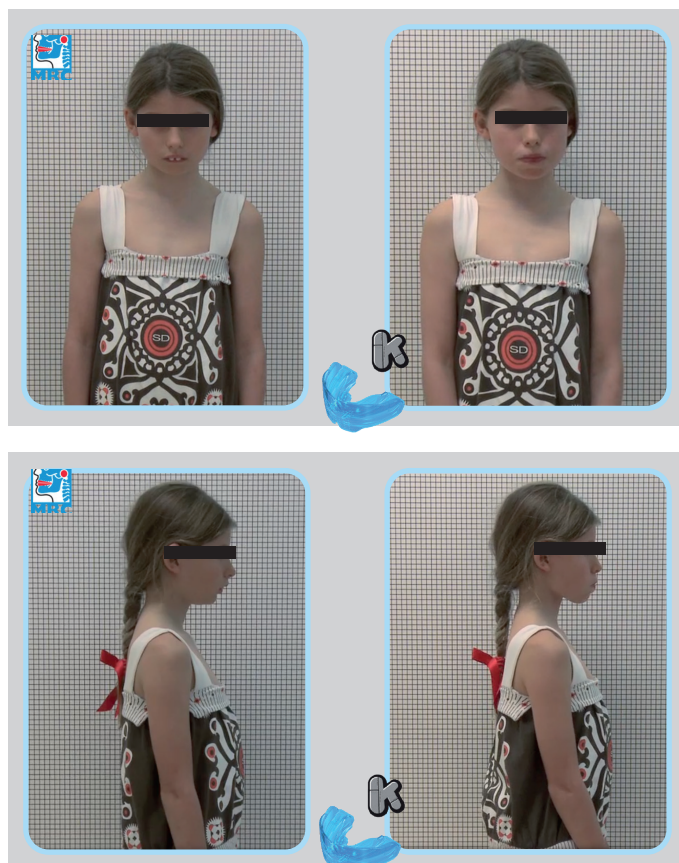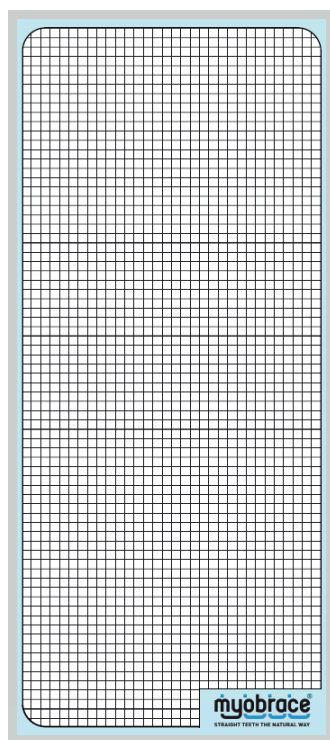




| Cod. | Descrizione |
|------------|----------------------------------|
| PT00POSTER | Poster sfondo foto (85 x 200 cm) |

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL MISURATORE MYOBACE

Procedere allineando le frecce sul lato distale del secondo incisivo superiore destro.

La linea corrispondente al lato distale del secondo incisivo superiore sinistro identifica la misura.

- Le prime due linee identificano un dispositivo **SMALL**
- Le tre linee centrali identificano un dispositivo **MEDIUM**
- Le ultime due linee identificano un dispositivo **LARGE**

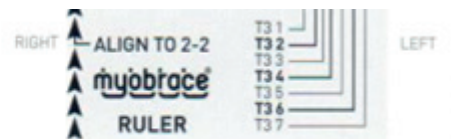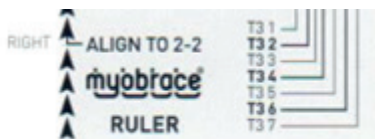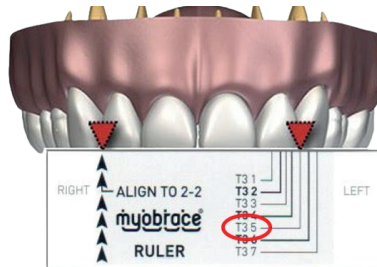

SET MISURAZIONE

Il Set Misurazione Myobrace aiuta i professionisti a selezionare il dispositivo corretto per i loro pazienti permettendo di individuare la misura più adatta sulle impronte del caso o direttamente sul paziente.

IL SET MISURAZIONE

Include 8 dispositivi:

- N. 3 Dispositivi for KIDS: K1 (S-M-L)
- N. 2 Dispositivi for TEENS: T1 (M-L)
- N. 2 Dispositivi for BRACES: B1 (M-L)
- N. 1 Dispositivo Myotalea: TLJ (M)



I dispositivi in silicone medicale sono tutti autoclavabili a ciclo rapido a 121° imbustati singolarmente

DENTIZIONE MISTA Myobrace for KIDS



Età: 6+10 anni

Sviluppo della DENTIZIONE PERMANENTE Myobrace for TEENS



Età: 10+15 anni

Con i Brackets DENTIZIONE PERMANENTE Myobrace for BRACES



Con i Brackets

ESERCIZI Myotalea



Tutte le età

| Cod. | Descrizione |
|---------|---|
| PT25NEW | SET MISURAZIONE MYOBACE (K1 S-M-L, T1 M-L, B1 M-L, TLJ M) |



I RISULTATI CON MYOBRACE

Dentizione Decidua


- Respirazione orale
- Posizione della lingua bassa
- Deglutizione con spinta della lingua
- Incompetenza labiale
- Morso aperto
- Overjet
- Arcate dentarie strette
- Carenza di spazio



Trattamento con Myobrace® for Juniors

Dentizione Mista

- Respirazione orale
- Russamento
- Posizione della lingua bassa
- Deglutizione atipica
- Mascella e mandibola strette
- Affollamento
- Morso profondo
- Overjet

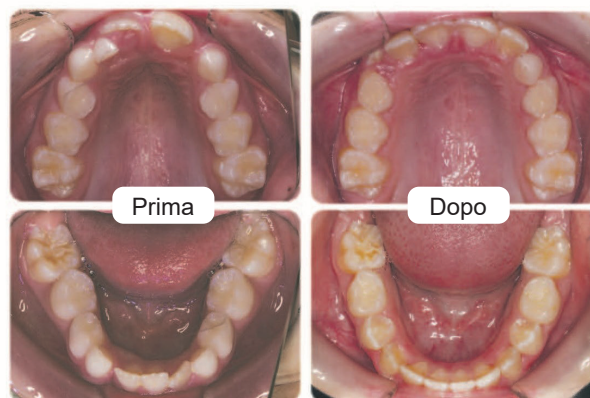

Trattamento con Myobrace® for Kids

Dentizione Mista - Classe III

- Respirazione orale
- Russamento
- Posizione della lingua bassa
- Deglutizione atipica
- Mascella e mandibola strette
- Affollamento
- Morso profondo
- Overjet



Trattamento con Myobrace® for Interceptive Class III e BWS

Sviluppo della Dentizione permanente

- Respirazione orale
- Russamento
- Posizione della lingua bassa
- Deglutizione atipica
- Mascella e mandibola strette
- Affollamento
- Morso profondo
- Overjet



Trattamento con Myobrace® for Teens e BWS



■ PERCHÉ SCEGLIERE MYOSA

In presenza di disturbi respiratori del sonno:

- iperventilazione orale
- russamento

■ COME SCEGLIERE IL TIPO DI MYOSA

• Da 3 a 15 anni

con BASSO BFT e BHT ≤ 25 sec.: **KS1**
con BUON BFT e BHT > 25 sec.: **KS2**

• Oltre 15 anni

con BHT ≤ 20 sec.: **S1H**
con BHT $> 20 \leq 30$ sec.: **S1**
con BHT > 30 sec.: **S2**
Stabilizzazione con BHT ≥ 45 sec.: **S3**

■ COME UTILIZZARE MYOSA

MYOSA for KIDS

MYOSA for S1H Hybrid

MYOSA for ADULTS

MYOSA for TEETH GRINDERS

MYOSA for TMJ

**1 o 2 ORE AL GIORNO
E DI NOTTE DURANTE IL SONNO.**

.....

**MYOSA for TMD
DURANTE IL GIORNO**



Myosa for Kids

Correzione miofunzionale
dei disturbi del sonno

Età: 3 ÷ 15 anni



Myosa for S1H Hybrid

Dispositivo miofunzionale
ibrido che combina i vantaggi
del trattamento passivo e attivo

Età: 15 anni +



Myosa for Adults

Correzione miofunzionale
dei disturbi del sonno

Età: 15 anni +



Myosa for Teeth Grinders PER BRUXISTI

Protezione dentale
dal bruxismo

Età: 15 anni +



Myosa for TMJ

Diagnosi immediata e
sollevio dei disturbi dell'ATM

Età: 15 anni +



Myosa for TMD

Dispositivo ausiliario per
i disturbi intracapsulari
avanzati dell'ATM

Età: 15 anni +



COME SCEGLIERE IL TIPO DI myosa® For Kids: Età 3 ÷ 15

- Con **BASSO BFT⁽¹⁾** e **BHT⁽²⁾ ≤ 25 sec.: KS1**
- Con **BUON BFT⁽¹⁾** e **BHT⁽²⁾ > 25 sec.: KS2**

⁽¹⁾ Valutazione respiratoria

⁽²⁾ Tempo sospensione respiratoria

TEST BHT

Il test "Breath Hold Time" (Tempo di Sospensione Respiratoria) viene utilizzato per valutare la funzione respiratoria del paziente. Durante questo test chiediamo al paziente di fare due cicli di respirazione dal naso e dopo la seconda espirazione trattenere il respiro.

Al paziente è richiesto di trattenere il respiro fino a quando non sente il bisogno di respirare senza aspettare di essere in forte disagio. Il tempo durante il quale il paziente è stato in grado di trattenere il respiro è il suo **BHT** ed è indicato in secondi sulla scheda di valutazione. Man mano che la funzione respiratoria migliora, il **BHT** aumenta.

MYOSA® FOR KIDS

Per età da 3 a 15 anni

I dispositivi **Myosa® for Kids** sono disponibili in tre diverse misure, per pazienti di età compresa tra i 3 e i 15 anni. Il sistema di trattamento a due fasi, inizia creando una via aerea funzionale e prosegue favorendo la respirazione nasale e la correzione delle abitudini miofunzionali viziate.

Le tre misure si adattano alle diverse fasce d'età:

- Small per età 3 ÷ 6 anni*
- Medium per età 6 ÷ 10 anni*
- Large per età 10 ÷ 15 anni*

*Le fasce d'età sono solo consigliate e le taglie dei singoli pazienti possono variare.



STABILIRE UNA VIA AEREA FUNZIONALE E INIZIARE LA CORREZIONE MIOFUNZIONALE

L'obiettivo del **KS1** è quello di creare una via aerea funzionale e correggere le abitudini viziate nei bambini che respirano con la bocca, soprattutto durante il sonno.

Il **KS1** è dotato di ampi fori di respirazione per il passaggio graduale alla respirazione nasale e caratteristiche per favorire le abitudini corrette. Passare al dispositivo **KS2** solo quando si porta il **KS1** tutta la notte e la funzione respiratoria del paziente è migliorata. (TEST BFT)

DUE AMPI FORI DI AERAZIONE
per iniziare a favorire la respirazione nasale

VISTA POSTERIORE

SEZIONE TRASVERSALE

BASE SPESSE per aprire il morso e le vie respiratorie

BASE A CUSCINETTO D'ARIA per aprire le vie respiratorie

| Cod. | Descrizione |
|----------|-------------------------|
| PT706005 | KS1 Myosa KIDS S blu |
| PT706000 | KS1 Myosa KIDS M blu |
| PT706001 | KS1 Myosa KIDS M rosa |
| PT706010 | KS1 Myosa KIDS L blu |
| PT706012 | KS1 Myosa KIDS L trasp. |



STABILIRE LA RESPIRAZIONE NASALE E CORREGGERE LE ABITUDINI MIOFUNZIONALI

L'obiettivo del **KS2** è quello di stabilire la respirazione nasale e correggere i disturbi miofunzionali nei bambini che respirano con la bocca e hanno abitudini viziate. Il **KS2** è dotato di piccoli fori di respirazione per stabilire la respirazione nasale e di caratteristiche per favorire abitudini corrette.

Una volta ottenuta la funzionalità delle vie aeree, i pazienti possono eventualmente passare al Sistema Myobrace® per ottenere ulteriori miglioramenti.

DUE PICCOLI FORI DI AERAZIONE
favoriscono la respirazione nasale

VISTA POSTERIORE

SEZIONE TRASVERSALE

BASE SOTTILE per consentire un collocamento ideale delle articolazioni mascellari

| Cod. | Descrizione |
|----------|-------------------------|
| PT706040 | KS2 Myosa KIDS S trasp. |
| PT706050 | KS2 Myosa KIDS M blu |
| PT706060 | KS2 Myosa KIDS L blu |



1 La lamella linguale guida la lingua nella corretta postura avanzata ed elevata

2 La rampa linguale tiene la lingua nella posizione corretta

3 Lip bumper riattiva i muscoli delle labbra per una corretta deglutizione



COME SCEGLIERE IL TIPO DI myosa® For Adults: Età 15 anni+


- Con BHT⁽²⁾ ≤ 20 sec.: **S1H**
 - Con BHT⁽²⁾ > 20 ≤ 30 sec.: **S1**
 - Con BHT⁽²⁾ > 30 sec.: **S2**
 - Stabilizzazione con BHT⁽²⁾ ≥ 45 sec.: **S3**
- ⁽²⁾ Tempo sospensione respiratoria

■ MYOSA® S1H HYBRID

Dentizione Permanente (15 anni+)

Myosa® S1H è un dispositivo ibrido che combina i vantaggi del trattamento miofunzionale passivo e attivo. L'ampia apertura di respirazione dell'S1H nella parte anteriore del dispositivo consente la respirazione orale senza interferenze da parte della lingua o delle labbra per facilitare il passaggio alla respirazione nasale, mentre il tubo di pressione labiale rafforza i muscoli labiali. Allo stesso tempo, il tubo di pressione linguale guida la lingua in avanti e consente all'aria di passare direttamente nella bocca senza ostruzioni da parte della lingua e aggiunge al dispositivo una funzione attiva di rafforzamento della lingua.

**S1H
HYBRID**

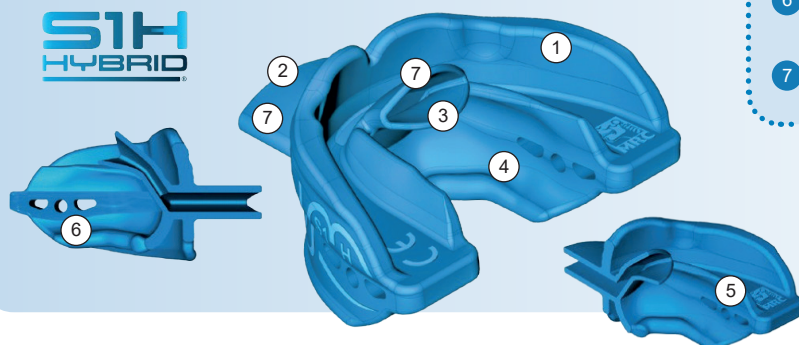

- 1 I **Bordi alti** garantiscono una buona ritenzione senza modellare.
- 2 L'**ampia apertura di respirazione** consente la respirazione orale senza interferenze da parte della lingua e delle labbra.
- 3 Il **Tubo di pressione linguale** guida la lingua in avanti e consente all'aria di passare direttamente nella bocca senza essere ostruita dalla lingua.
- 4 Il **Rialzo linguale** mantiene la lingua in una posizione rivolta verso l'alto e in avanti.
- 5 Il dispositivo in **silicone medicale**, morbido e flessibile, ottimizza il comfort senza necessità di adattamento.
- 6 La **base con molle ad aria multiple** apre le vie aeree fornendo comfort alle articolazioni della mascella (ATM) e aiuta ad alleviare i disturbi ed i click dell'ATM.
- 7 **Tubi di pressione labiale e linguale** - per esercizi di respirazione attiva e rafforzamento muscolare.

| Cod. | Descrizione |
|------|-------------|
|------|-------------|

| | |
|----------|------------------|
| PT700002 | Myosa S1H Hybrid |
|----------|------------------|

■ MYOSA® FOR ADULTS S1-S2-S3

Dentizione Permanente (15 anni+)

Si verifica quando il flusso di aria attraverso naso o bocca è ostruito durante il sonno. Mentre l'ostruzione delle vie respiratorie è generalmente causata da rilassamento ed ipotono dei muscoli di collo e volto, ci sono molte altre cause alla base dell'SDB.

Fra le cause più comuni, vi sono respirazione orale cronica, cattiva alimentazione, obesità e iposviluppo anteriore delle mascelle.


Anche le estrazioni ortodontiche possono aggravare i problemi di respirazione.

Quando indossato, MyOSA® TMJBDS for Adults apre le vie respiratorie e controlla l'iperventilazione orale.

Gli scudi laterali flessibili e la base a cuscino d'aria

riducono al minimo l'impatto sull'ATM, rendendolo adatto per chi ha problemi di ATM o bruxismo.

È importante ricordare che le disfunzioni respiratorie non si limitano alla respirazione orale. I dispositivi MyOSA® sono progettati per ridurre l'iperventilazione e stimolare la respirazione diaframmatica quando associati ad opportuni esercizi di respirazione.

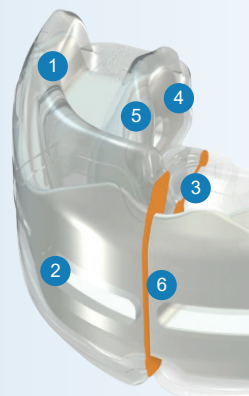


- 1 **Bordi alti** garantiscono una buona ritenzione
- 2 **Fori di respirazione** regolano la respirazione attraverso la bocca
- 3 **Lamella linguale** guida la lingua nella corretta postura avanzata ed elevata
- 4 La **rampa linguale** tiene la lingua nella posizione corretta
- 5 La **base a cuscinetto d'aria** decomprime progressivamente l'ATM e apre le vie aeree.
- 6 L'**offset di classe I** fa avanzare la mandibola riducendo la collapsabilità delle vie aeree




MYOSA® FOR ADULTS S1-S2-S3 Dentizione Permanente (15 anni+)

20

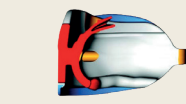S1**FASE 1 - NON MODELLABILE**
VERSIONE PER RESPIRATORI ORALIMIGLIOR
COMFORT
E ADATTABILITÀSEZ. TRASVERSALE (sopra)
DISPOSITIVO (a destra)

Il dispositivo **Myosa® S1** è progettato per i pazienti con disfunzioni respiratorie da moderate a importanti, con BHT (Tempo di trattenimento del respiro) da 20 a 30 secondi. L'**S1** è morbido, flessibile e si adatta a qualsiasi forma di arcata o malocclusione. Agisce facendo avanzare la mandibola e aprendo il morso, liberando le vie respiratorie. Inoltre, **S1** è dotato di quattro fori di respirazione per consentire la respirazione orale ed una lamella linguale attiva per allenare la lingua nelle fasi iniziali del trattamento.


| Cod. | Descrizione |
|----------|--------------------------------|
| PT700000 | S1 Myosa (respira dalla bocca) |

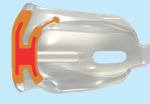S1M**FASE 1 - MODELLABILE**
VERSIONE PER RESPIRATORI ORALIMIGLIORE
RITENZIONE
PERSONALIZZABILESEZ. TRASVERSALE (sopra)
DISPOSITIVO (a destra)

Il dispositivo **Myosa® S1M Modellabile** è realizzato con tecnologia a doppio strato, con uno strato esterno modellabile e un supporto interno rigido per facilitare la personalizzazione. Sebbene sia preferibile l'uso di dispositivi non modellabili, l'**S1M** è stato progettato appositamente per i pazienti che hanno difficoltà a trattenere il dispositivo S1 durante il sonno. Un'adeguata tecnica di modellazione è essenziale per il corretto funzionamento dell'**S1M**. Maggiori dettagli sono riportati sulla scheda del dispositivo e sul sito web di MRC.

| Cod. | Descrizione |
|----------|---|
| PT700001 | S1M Myosa modellabile (respira dalla bocca) |

30

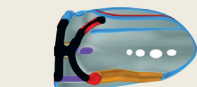S2**FASE 2 - NON MODELLABILE**
VERSIONE PER RESPIRATORI PARZIALMENTE NASALIMIGLIOR
COMFORT
E ADATTABILITÀSEZ. TRASVERSALE (sopra)
DISPOSITIVO (a destra)

Il dispositivo **Myosa® S2** è progettato per i pazienti con disfunzioni respiratorie da lievi a moderate, con BHT (Tempo di trattenimento del respiro) maggiore di 30 secondi. L'**S2** è morbido, flessibile e si adatta a qualsiasi forma di arcata o malocclusione. Presenta un'apertura verticale più piccola rispetto all'**S1** per migliorare la posizione dell'ATM e fori respiratori più piccoli per favorire la respirazione nasale, mentre le altre caratteristiche miofunzionali continuano la correzione delle abitudini viziate.

| Cod. | Descrizione |
|----------|-----------------------------------|
| PT700005 | S2 Myosa (respira anche dal naso) |

S2M**FASE 2 - MODELLABILE**
VERSIONE PER RESPIRATORI PARZIALMENTE NASALIMIGLIORE
RITENZIONE
PERSONALIZZABILESEZ. TRASVERSALE (sopra)
DISPOSITIVO (a destra)

Il dispositivo **Myosa® S2M Modellabile** è realizzato con tecnologia a doppio strato, con uno strato esterno modellabile e un supporto interno rigido per facilitare la personalizzazione. Sebbene sia preferibile l'uso di dispositivi non modellabili, l'**S2M** è stato progettato appositamente per i pazienti che hanno difficoltà a trattenere il dispositivo S2 durante il sonno. Un'adeguata tecnica di modellazione è essenziale per il corretto funzionamento dell'**S2M**. Maggiori dettagli sono riportati sulla scheda del dispositivo e sul sito web di MRC.

| Cod. | Descrizione |
|----------|--|
| PT700006 | S2M Myosa modellabile (respira anche dal naso) |


45

S3**FASE 3 - NON MODELLABILE**
VERSIONE PER RESPIRATORI NASALIMIGLIOR
COMFORT
E ADATTABILITÀSEZ. TRASVERSALE (sopra)
DISPOSITIVO (a destra)

Il dispositivo **Myosa® S3** viene utilizzato nella terza e ultima fase di trattamento quando il BHT del paziente ha raggiunto o superato i 45 secondi. È stato progettato principalmente per stabilire la respirazione nasale, ultimare la correzione delle abitudini viziate e consentire una funzione ottimale dell'ATM. Può essere utilizzato anche come unico dispositivo per la respirazione negli adulti e per la correzione delle abitudini miofunzionali. L'**S3** viene utilizzato in fase di ritenzione dopo aver terminato il trattamento.

| Cod. | Descrizione |
|----------|-----------------------------|
| PT700010 | S3 Myosa (respira dal naso) |

Stress
Bruxismo
Malocclusione
Traumi

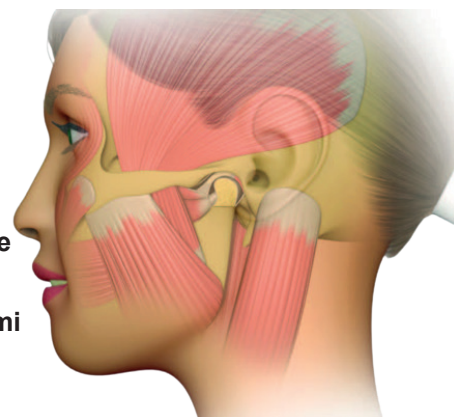

Stress, bruxismo, malocclusione e traumi sono tutti fattori che contribuiscono ad avere problemi dell'ATM, ma le cause principali sono la respirazione e i disturbi miofunzionali.

TEMPO DI TRATTENIMENTO DEL RESPIRO (BHT)




MYOSA® FOR TEETH GRINDERS - Per Bruxisti Dentizione Permanente (15 anni+)

FOR TEETH GRINDERS

Il digrignamento dei denti, o bruxismo, è un problema diffuso associato alla respirazione orale e può essere aggravato da stress e tensione nervosa.

Il bruxismo può provocare danni ai denti, comprese erosioni visibili dello smalto, fratture ed eccessiva mobilità dentale. Anche se tutti i dispositivi Myosa® offrono protezione contro i danni del bruxismo, Myosa® for Teeth Grinders è stato progettato appositamente per questo scopo e interpone una barriera protettiva fra i denti. Soggetti a naturale usura nel tempo, questi dispositivi si possono sostituire facilmente per prevenire danni alla dentatura.

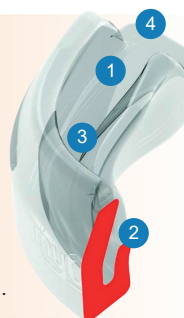

- 1 **Base più spessa** per migliore protezione
- 2 **Protezioni per la lingua** aiutano a posizionare la lingua correttamente.
- 3 **Facilmente modellabile** in meno di 2 minuti e ripetibile più volte
- 4 **Base a profilo alare** decomprime l'ATM

Myosa® TG - Soft Terapia notturna - Personalizzabile



Il Myosa® TG è progettato per la massima efficacia nei bruxisti senza patologie all'ATM. Il dispositivo morbido ed a strato singolo si adatta ad ogni dimensione orale ed aiuta a ridurre la tensione muscolare periorale durante il sonno notturno. Facile da adattare, il TG si indossa di notte e volendo anche di giorno in caso di bruxismo cronico.

| Cod. | Descrizione |
|----------|------------------|
| PT703030 | Myosa TG morbido |

Myosa® TGH - Hard Terapia notturna - Personalizzabile



Myosa® TGH è realizzato con tecnologia a doppio strato, con interno più rigido ed esterno più soffice, per una perfetta aderenza ed un'azione più durevole. Il TGH può essere usato come placca di svincolo (pivotale), oppure adattato in occlusione centrica o anteriore. Dal momento che spesso il dispositivo si usa solo di notte, vi sono meno rischi di modifiche nell'occlusione. TGH può essere impiegato anche nella diagnosi iniziale delle patologie ATM.

| Cod. | Descrizione |
|----------|------------------|
| PT703035 | Myosa TGH rigido |

MYOSA® FOR TMJ - Per ATM Dentizione Permanente (15 anni+)



PERSONALIZZABILE

myOSA® TMD - Terapia diurna profilo sottile per eloquio inalterato

- 1 **Modellabile** personalizzazione del bite
- 2 **Basso spessore** per comfort e facilità di eloquio
- 3 **Interno più rigido** per una perfetta aderenza
- 4 **Profilo alare** per la decompressione articolare



Myosa® TMD è progettato per la diagnosi e il trattamento dell'ATM. Adattato e personalizzato dal dentista nell'occlusione ideale, ha un profilo sottile per un confortevole uso diurno con eloquio inalterato. Se impiegato in associazione all'uso notturno di Myosa® TMJ, Myosa® TMD è indicato ai pazienti con più severa sintomatologia causata da patologie dell'ATM. Disponibile in due spessori con apertura del morso di 4 e 6 mm.

| Cod. | Descrizione |
|----------|-------------------------------|
| PT703010 | Myosa TMD 6 mm (giorno) |
| PT703011 | Myosa TMD basso 4 mm (giorno) |



myOSA® TMJ

Si porta 1 o 2 ore al giorno e durante il sonno notturno

- 1 **Doppia arcata** per favorire la respirazione nasale e limitare il bruxismo
- 2 **Lamella linguale, scudi e rampa linguale** controllano la posizione della lingua
- 3 **Profilo alare** decomprime l'ATM favorendo la riduzione dei sintomi
- 4 **Determina occlusione** e apertura di morso ottimali per la maggioranza dei pazienti



Myosa® TMJ non richiede alcun adattamento ed è concepito come dispositivo per la diagnosi e la terapia iniziale delle patologie dell'ATM. Favorendo la decompressione dell'ATM, la correzione della respirazione orale, della postura linguale e limitando il bruxismo, il dispositivo allevia i sintomi dei disturbi dell'ATM rimuovendo la pressione sull'articolazione e rilassando i muscoli di testa e collo.

| Cod. | Descrizione |
|----------|-------------------|
| PT703000 | Myosa TMJ (notte) |



ATTIVA

(Utilizzo diurno per eseguire gli esercizi)



□ PERCHÉ SCEGLIERE MYOTALEA


- Per esercitare lingua, labbra e muscolatura: TLJ
- Per esercitare lingua, labbra e muscolatura su pazienti con i brackets: TLJB
- Per esercitare muscolatura labiale: LIP TRAINER e TLP



Myotalea TLJ

Dispositivi progettati per rinforzare i muscoli linguali, labiali, mascellari faringei e sopraioidei

Tutte le età

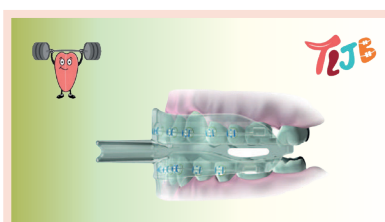

Myotalea TLJB CON BRACKETS

Dispositivi progettati per rinforzare i muscoli linguali, labiali, mascellari faringei e sopraioidei

Tutte le età



Myotalea Lip Trainer

Dispositivo progettato per ottenere una competenza labiale adeguata per rinforzare i muscoli labiali

Tutte le età



Myotalea TLP

Dispositivo di pressione linguale e labiale

Tutte le età



RINFORZA MUSCOLI DI LINGUA,
LABBRA E MASCELLA



LABBRA E LINGUA
PIU' FORTI



FORZA E COMPETENZA
LABIALE

myoTALEA®

MYOTALEA® - TLJ/TLJB - TLP - Lip Trainer


Utilizzare durante gli esercizi 2 volte al giorno

Per tutte le età

Myotalea® TLJ è il dispositivo miofunzionale intra-orale attivo numero uno al mondo, progettato specificamente per rinforzare i muscoli linguali, labiali, mascellari, faringei e sopraioidei. Con l'arrivo di Myotalea® TLJ, i professionisti sanitari hanno ora la possibilità di migliorare la competenza labiale, la forza dei muscoli linguali, faringei e sopraioidei, così come anche di passare alla respirazione nasale con un unico sistema integrato e facile da usare.

Il TLJ ha numerose caratteristiche che aiutano nella correzione delle abitudini viziate dei tessuti molli:

- Respirazione orale abituale
- Posizione di riposo a labbra aperte
- Posizione di riposo con lingua ribassata
- Carenza di forza nei muscoli di gola e vie aeree
- Deglutizione viziosa

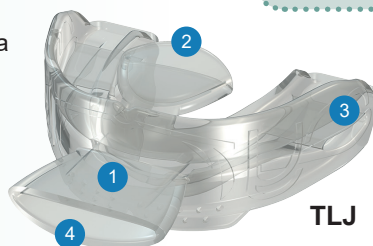

- 1 Il tubo a pressione labiale rafforza i muscoli labiali, il che migliora la competenza delle labbra promuovendo così la respirazione nasale
- 2 Il tubo a pressione linguale migliora la forza e la postura linguale
- 3 Le molle ad aria TMJ migliorano la funzione dell'articolazione temporo-mandibolare e dei muscoli associati


- 4 L'apertura variabile per il sonno (MYOVOSA®) aiuta il paziente a passare dalla respirazione orale a quella nasale

| Cod. | Descrizione |
|----------|----------------------------|
| PT710005 | MyoTALEA TLJ S Trasparente |
| PT710000 | MyoTALEA TLJ M Trasparente |

| Cod. | Descrizione |
|----------|-------------------------------------|
| PT710010 | MyoTALEA TLJ L Trasparente |
| PT714000 | MyoTALEA TLJB M con attacchi Trasp. |

DISPONIBILE ANCHE PER L'USO CON APPARECCHI ORTODONTICI

Il TLJ per apparecchi ortodontici - **TLJB** comprende tutte le caratteristiche del TLJ, con uno spazio più ampio per l'alloggiamento degli attacchi

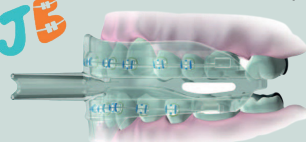

Spazio più ampio



Vista posteriore del TLJB

Myotalea® TLP è stato il precursore del dispositivo TLJ e funziona in modo simile, al netto dell'esercizio dell'articolazione temporo-mandibolare. I professionisti possono utilizzare il TLP nelle varie fasi terapeutiche per lavorare sui muscoli labiali, linguali e faringei.



TLP

| Cod. | Descrizione |
|----------|--------------------------|
| PT710050 | MyoTALEA TLP morbido blu |
| PT710070 | MyoTALEA TLP rigido blu |

Myotalea® Lip Trainer™ è progettato per ottenere una competenza labiale adeguata e per rinforzare i muscoli labiali, eliminando l'eccessiva attività del mentoniero quando si deglutisce. Molti pazienti presentano segni di incompetenza delle labbra e scarso tono muscolare intorno al muscolo orbicolare della bocca. Si può utilizzare in qualsiasi fase del trattamento Myobrace® o Myosa®.



Lip Trainer

| Cod. | Descrizione |
|----------|-----------------------------------|
| PT590500 | MyoTALEA LIP TRAINER morbido blu |
| PT590505 | MyoTALEA LIP TRAINER morbido rosa |

CONTATTI

• PER ORDINI

Primalux Ortodonzia S.r.l.

Sede operativa in Torino
Effettua spedizioni in tutta Italia

Tempi di consegna per l'Italia peninsulare
(Calabria esclusa): *24/48 ore

Tempi di consegna per Isole e Calabria: *48/72 ore

*Tempi di consegna validi per ordini ricevuti entro le ore 12

Spese di spedizione addebitate per ordini di importo inferiore ad € 250 (Iva esclusa)

Nessun reclamo verrà preso in considerazione trascorsi 30 gg. dal ricevimento della merce. Non si accettano resi di materiale se non precedentemente concordati ed autorizzati dalla ns. direzione. Gli eventuali resi dovranno essere accompagnati dal documento di trasporto indicante il numero e la data della fattura o D.D.T. relativo al prodotto.

Gli ordini possono essere effettuati:

- Telefonicamente: **011 773 2551**
- Via email: **ordini@primalux.it**
- Dal sito web: **www.primalux.it**

• PER CORSI

Primalux organizza corsi di formazione in presenza e On Demand.

La ns. piattaforma corsi online "**Primalux Academy**" mette a disposizione corsi di formazione On Demand, da seguire comodamente da remoto con qualsiasi dispositivo, e rivedere in qualsiasi momento.

Sito web: **www.primaluxacademy.com**

Per ulteriori informazioni: **corsi@primalux.it**





Primalux Ortodonzia S.r.l.

Corso Francia 430 - 10146 - Torino (TO)

Tel. 011 773 2551 - ordini@primalux.it - www.primalux.it



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

**CORRECTING BREATHING
HABITS SINCE 1989**

Distributore esclusivo per l'Italia

SCARICA



Bibliografia e
ricerche MRC