

## STERILIZZAZIONE DISPOSITIVI IN SILICONE MEDICO

I dispositivi in silicone medico sono autoclavabili a ciclo rapido ad una temperatura massima di 121°, devono essere imbustati e non stare a contatto con strumenti o altro.


In mancanza di autoclave si possono far bollire in acqua distillata per 5 minuti.

Dispositivi autoclavabili MYOBRACE: Tutti i dispositivi di FASE 1

Dispositivi autoclavabili MYOSA: TMJ - KS1 - KS2 - S1H - S1 - S2 - S3


### DISPOSITIVI MYOBRACE:

Tutti i dispositivi di Fase 1

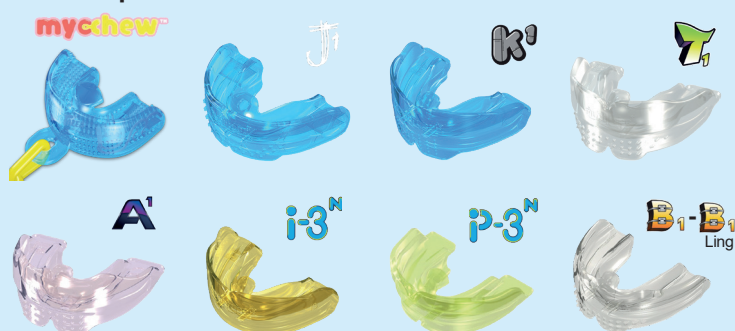

### DISPOSITIVI MYOSA

TMJ - KS1 - KS2 - S1H - S1 - S2 - S3

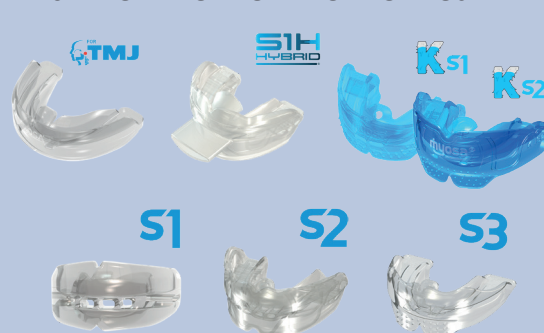

## PERSONALIZZAZIONE DISPOSITIVI



#### STEP 1

Versare acqua bollente in una ciotola. Immergere il dispositivo con la base verso l'alto e lasciarlo per circa:  
- 20/30 sec. MYOSA TG  
- 90/120 sec. MYOSA TGH-TMD-S1M-S2M



#### STEP 4

Chiudere la bocca mordendo con decisione il dispositivo. Aspirare con forza e facendo pressione su labbra e guance premere i bordi sui denti e sul bordo gengivale.



#### STEP 2

Sollevare delicatamente il dispositivo utilizzando un cucchiaino e rimuovere l'acqua in eccesso per portare la superficie ad una temperatura confortevole. Procedere rapidamente allo step successivo.



#### STEP 5

Rimuovere il dispositivo dalla bocca e far raffreddare sotto acqua fredda corrente per 2 minuti. Riposizionarlo in bocca per controllare che si adatti perfettamente; se necessario ripetere la procedura, con il dispositivo a temperatura ambiente



#### STEP 3

Difronte ad uno specchio allineare il dispositivo con la linea centrale dei denti superiori. Con le dita esercitare pressione sulla base in maniera da dar forma alla zona frontale e, sempre con le dita, far pressione sulle labbra e sulle guance in maniera da modellare la zona posteriore.

## PULIZIA DISPOSITIVI

Sciacquare con acqua calda (non bollente) e MYOCLEAN una volta alla settimana. Può essere utilizzato anche un dentifricio.

In caso di bruxismo grave si può verificare un rapido deterioramento del dispositivo. Sostituire quando usurato o non più stabile in bocca.

### Myosa TG - TGH

PERSONALIZZABILE



### Myosa TMD

PERSONALIZZABILE



### Myosa S1M - S2M

PERSONALIZZABILE

